



## Materialdatei aktualisieren:

- Überprüfung der Exocad Version:

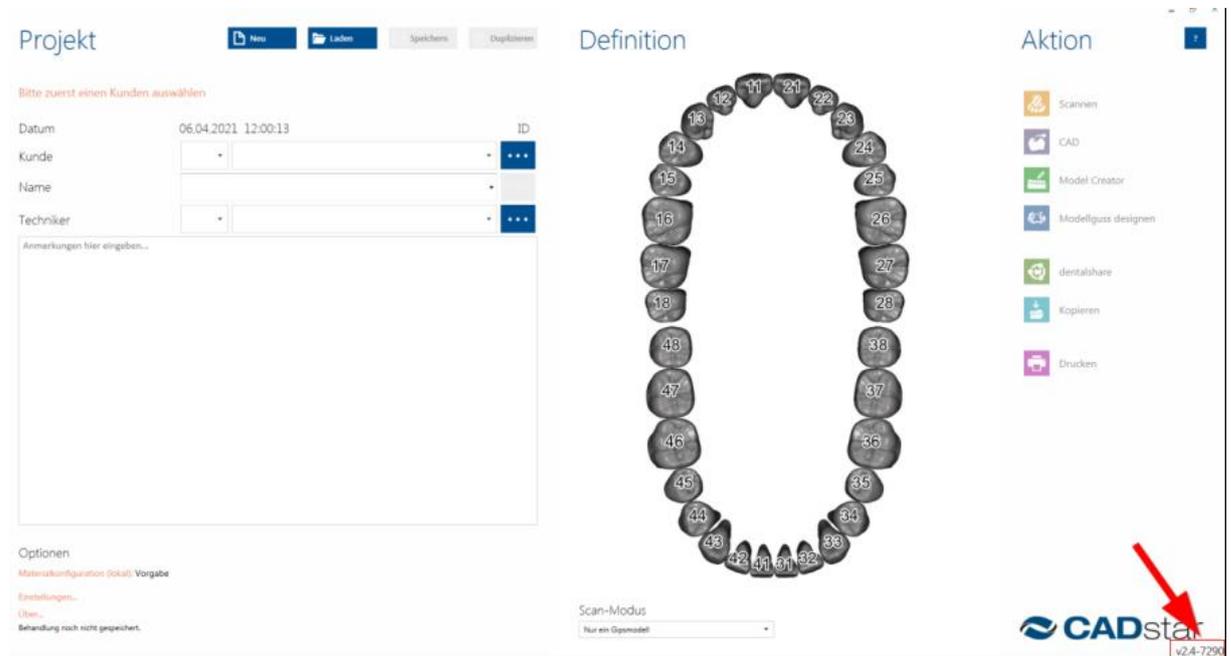

- Exocad Pfad öffnen (Rechtsklick auf das exo Symbol → Dateipfad öffnen)

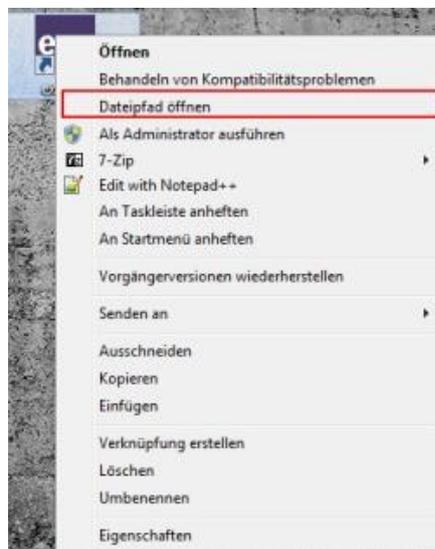


- Klick auf DentalDB



- Den Ordner config öffnen

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
bin	21.02.2019 11:20	Dateiordner	
config	12.10.2020 16:54	Dateiordner	
db	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
icons	01.03.2019 11:34	Dateiordner	
languages	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
Skins	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
DentalDB-generic-2019-02-20-integrity.s...	20.02.2019 15:59	SHA256-Datei	99 KB
DentalDB-generic-2019-02-20-integrity.s...	20.02.2019 15:59	SIG-Datei	1 KB

- Nun die entsprechende „WorkParamsDB.xml“ Datei aus dem Download in den Ordner einfügen und ersetzen

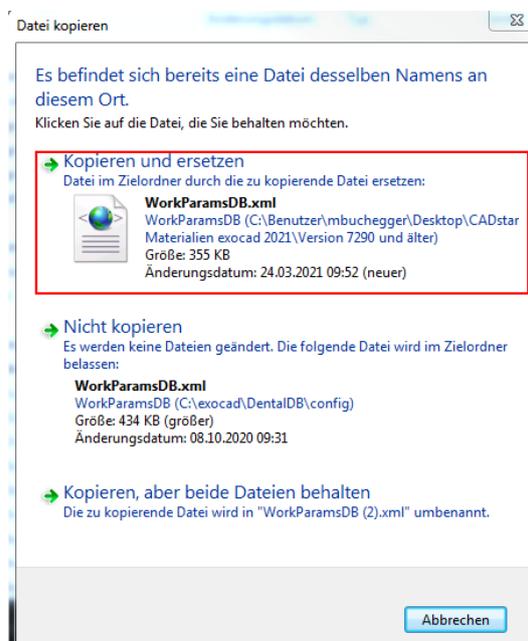

- Einmal auf „zurück“ klicken und den Ordner languages öffnen



bin	21.02.2019 11:20	Dateiordner	
config	12.10.2020 16:54	Dateiordner	
db	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
icons	01.03.2019 11:34	Dateiordner	
languages	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
Skins	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
DentalDB-generic-2019-02-20-integrity.s...	20.02.2019 15:59	SHA256-Datei	99 KB
DentalDB-generic-2019-02-20-integrity.s...	20.02.2019 15:59	SIG-Datei	1 KB

- Danach den Ordner german öffnen und die Datei materials-german.xml hineinkopieren und ersetzen

chinese-simplified	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
chinese-traditional	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
czech	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
english	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
french	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
german	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
greek	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
italian	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
japanese	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
korean	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
portuguese	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
russian	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
spanish	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
turkish	21.02.2019 11:21	Dateiordner	
customer.xml	20.02.2019 15:56	XML-Dokument	1 KB
Materials.xml	20.02.2019 15:56	XML-Dokument	15 KB
multilingual.xml	20.02.2019 15:56	XML-Dokument	2 KB

Datei kopieren

Es befindet sich bereits eine Datei desselben Namens an diesem Ort.  
Klicken Sie auf die Datei, die Sie behalten möchten.

→ **Kopieren und ersetzen**  
Datei im Zielordner durch die zu kopierende Datei ersetzen:

 **materials-german.xml**  
materials-german  
(C:\Benutzer\mbuchegger\Desktop\CADstar Materialien exocad 2021\Version 7290 und älter)  
Größe: 13,8 KB  
Änderungsdatum: 22.03.2021 16:57 (neuer)

→ **Nicht kopieren**  
Es werden keine Dateien geändert. Die folgende Datei wird im Zielordner belassen:

 **materials-german.xml**  
materials-german (C:\exocad\DentalDB\languages\german)  
Größe: 13,9 KB (größer)  
Änderungsdatum: 16.04.2019 12:16

→ **Kopieren, aber beide Dateien behalten**  
Die zu kopierende Datei wird in "materials-german (2).xml" umbenannt.

- Sollten Sie exocad in Englisch verwenden bitte dasselbe mit Ordner „english“ und der Datei Materials-english.xml durchführen.
- Nun die exocad Software neu starten und die Materialien sind upgedatet

