



		zusätzlicher Abstand X/Y	Zementspaltdicke	zusätzlicher Abstand okklusal	Beginn Zementspalt	Mindestdicke	Horizontaler Kronenrand	Angewinkelter Kronenrand	Winkel	Verbinderquerschnitt
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm ²
CADstar Zirkon	Strenger Sitz	0.01	0.02	0.04	2.0					
	Normal	0.01	0.04	0.04	1.0	0.5	0.15	0.15	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.06	0.5					
CADstar Zirkon HT	Strenger Sitz	0.01	0.02	0.04	2.0					
	Normal	0.01	0.04	0.04	1.0	0.5	0.2	0.2	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.06	0.5					
CADstar Zirkon HT Ultra	Strenger Sitz	0.01	0.02	0.04	2.0					
	Normal	0.01	0.04	0.04	1.0	0.5	0.2	0.2	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.06	0.5					
CADstar Zirkon Multi- Layer	Strenger Sitz	0.01	0.02	0.04	2.0					
	Normal	0.01	0.04	0.04	1.0	1.0	0.2	0.2	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.06	0.5					
CADstar IPS e.max CAD	Strenger Sitz	0.02	0.06	0.06	1.0					
	Normal	0.02	0.06	0.06	1.0	1.0	0.2	0.2	65°	nur Einzelzähne
	Weit	0.02	0.06	0.06	1.0					
CADstar Vita ENAMIC	Strenger Sitz	0.02	0.04	0.04	1.0					
	Normal	0.02	0.06	0.06	1.0	1.0	0.15	0.15	55°	nur Einzelzähne
	Weit	0.02	0.08	0.08	1.0					
CADstar Lava™ Ultimate	Strenger Sitz	0.025	0.03	0.06	2.0					
	Normal	0.025	0.05	0.07	1.5	0.5	0.1	0.1	68°	nur Einzelzähne
	Weit	0.025	0.07	0.08	1.0					
CADstar Ambarino High-Class	Strenger Sitz	0.02	0.02	0.05	2.0					
	Normal	0.02	0.04	0.07	1.0	0.7	0.2	0.2	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.09	0.5					
CADstar peracam	Strenger Sitz	0.02	0.02	0.05	2.0					
	Normal	0.02	0.04	0.07	1.0	0.7	0.2	0.2	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.09	0.5					
CADstar PMMA Telio CAD	Strenger Sitz	0.01	0.02	0.04	2.0					
	Normal	0.01	0.04	0.04	1.0	0.6	0.15	0.15	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.06	0.5					
CADstar PMMA clear	Strenger Sitz	0.01	0.02	0.04	2.0					
	Normal	0.01	0.04	0.04	1.0	0.6	0.15	0.15	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.06	0.5					
CADstar PEEK	Strenger Sitz	0.01	0.02	0.04	2.0					
	Normal	0.01	0.04	0.04	1.0	0.6	0.15	0.15	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.06	0.5					
CADstar Cobalt-Chrom	Strenger Sitz	0.02	0.05	0.06	1.5					
	Normal	0.02	0.07	0.08	0.8	0.35	0.05	0.05	65°	Verblockung: 6mm Brückenverbund: 8mm
	Weit	0.03	0.09	0.1	0.5					
CADstar Titan	Strenger Sitz	0.02	0.04	0.05	1.5					
	Normal	0.02	0.06	0.07	0.8	0.4	0.1	0.1	65°	Verblockung: 6mm Brückenverbund: 8mm
	Weit	0.02	0.08	0.09	0.5					

		Passungsparameter	Erweiterter Zementspalt	Passungshöhe	Wandstärke	Präparationsgrenzenausgleich	Erweiterter Präparationsgrenzenausgleich	Randwinkel	Verbinderquerschnitt
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm ²
CADstar Zirkon	Strenger Sitz	0.01	0.02	2.0					
	Normal	0.01	0.04	1.0	0.5	0.15	0.15	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.5					
CADstar Zirkon HT	Strenger Sitz	0.01	0.02	2.0					
	Normal	0.01	0.04	1.0	0.5	0.2	0.2	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.5					
CADstar Zirkon HT Ultra	Strenger Sitz	0.01	0.02	2.0					
	Normal	0.01	0.04	1.0	0.5	0.2	0.2	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.5					
CADstar Zirkon Multi- Layer	Strenger Sitz	0.01	0.02	2.0					
	Normal	0.01	0.04	1.0	1.0	0.2	0.2	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.5					
CADstar IPS e.max CAD	Strenger Sitz	0.02	0.06	1.0					
	Normal	0.02	0.06	1.0	1.0	0.2	0.2	65°	nur Einzelzähne
	Weit	0.02	0.06	1.0					
CADstar Vita ENAMIC	Strenger Sitz	0.02	0.04	1.0					
	Normal	0.02	0.06	1.0	1.0	0.15	0.15	65°	nur Einzelzähne
	Weit	0.02	0.08	1.0					
CADstar Lava™ Ultimate	Strenger Sitz	0.025	0.03	2.0					
	Normal	0.025	0.05	1.5	0.5	0.1	0.1	68°	nur Einzelzähne
	Weit	0.025	0.07	1.0					
CADstar Ambarino High-Class	Strenger Sitz	0.02	0.02	2.0					
	Normal	0.02	0.04	1.0	0.7	0.2	0.2	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.5					
CADstar peracam	Strenger Sitz	0.02	0.02	2.0					
	Normal	0.02	0.04	1.0	0.7	0.2	0.2	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.5					
CADstar PMMA Telio CAD	Strenger Sitz	0.01	0.02	2.0					
	Normal	0.01	0.04	1.0	0.6	0.15	0.15	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.5					
CADstar PMMA clear	Strenger Sitz	0.01	0.02	2.0					
	Normal	0.01	0.04	1.0	0.6	0.15	0.15	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.5					
CADstar PEEK	Strenger Sitz	0.01	0.02	2.0					
	Normal	0.01	0.04	1.0	0.6	0.15	0.15	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.5					
CADstar Cobalt-Chrom	Strenger Sitz	0.02	0.05	1.5					
	Normal	0.02	0.07	0.8	0.35	0.05	0.05	65°	Verblockung: 6mm Brückenverbund: 8mm
	Weit	0.03	0.09	0.5					
CADstar Titan	Strenger Sitz	0.02	0.04	1.5					
	Normal	0.02	0.06	0.8	0.4	0.10	0.10	65°	Verblockung: 6mm Brückenverbund: 8mm
	Weit	0.02	0.08	0.5					

		Zementspalt	Horizontaler Zementspalt	Vertikaler Zementspalt	Übergangslinie	Mindestdicke	Randdicke	Randwinkelaufmaß	Randwinkel	Verbinderquerschnitt
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	mm ²
CADstar Zirkon	Strenger Sitz	0.01	0.02	0.04	2.0					
	Normal	0.01	0.04	1.0	1.0	0.5	0.15	0.15	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.5	0.5					
CADstar Zirkon HT	Strenger Sitz	0.01	0.02	2.0	2.0					
	Normal	0.01	0.04	1.0	1.0	0.5	0.2	0.2	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.5	0.5					
CADstar Zirkon HT Ultra	Strenger Sitz	0.01	0.02	2.0	2.0					
	Normal	0.01	0.04	1.0	1.0	0.5	0.2	0.2	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.5	0.5					
CADstar Zirkon Multi- Layer	Strenger Sitz	0.01	0.02	2.0	2.0					
	Normal	0.01	0.04	1.0	1.0	1.0	0.2	0.2	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.5	0.5					
CADstar IPS e.max CAD	Strenger Sitz	0.02	0.06	1.0	1.0					
	Normal	0.02	0.06	1.0	1.0	1.0	0.2	0.2	65°	nur Einzelzähne
	Weit	0.02	0.06	1.0	1.0					
CADstar Vita ENAMIC	Strenger Sitz	0.02	0.04	0.04	1.0					
	Normal	0.02	0.06	0.06	1.0	1.0	0.15	0.15	55°	nur Einzelzähne
	Weit	0.02	0.08	0.08	1.0					
CADstar Lava™ Ultimate	Strenger Sitz	0.025	0.03	0.06	2.0					
	Normal	0.025	0.05	0.07	1.5	0.5	0.1	0.1	68°	nur Einzelzähne
	Weit	0.025	0.07	0.08	1.0					
CADstar Ambarino High-Class	Strenger Sitz	0.02	0.02	0.05	2.0					
	Normal	0.02	0.04	0.07	1.0	0.7	0.2	0.2	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.09	0.5					
CADstar peracam	Strenger Sitz	0.02	0.02	0.05	2.0					
	Normal	0.02	0.04	0.07	1.0	0.7	0.2	0.2	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.09	0.5					
CADstar PMMA Telio CAD	Strenger Sitz	0.01	0.02	0.04	2.0					
	Normal	0.01	0.04	0.04	1.0	0.6	0.15	0.15	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.06	0.5					
CADstar PMMA clear	Strenger Sitz	0.01	0.02	0.04	2.0					
	Normal	0.01	0.04	0.04	1.0	0.6	0.15	0.15	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.06	0.5					
CADstar PEEK	Strenger Sitz	0.01	0.02	0.04	2.0					
	Normal	0.01	0.04	0.04	1.0	0.6	0.15	0.15	65°	Verblockung: 7mm Brückenverbund: 9mm
	Weit	0.02	0.06	0.06	0.5					
CADstar Cobalt-Chrom	Strenger Sitz	0.02	0.05	0.06	1.5					
	Normal	0.02	0.07	0.08	0.8	0.35	0.05	0.05	65°	Verblockung: 6mm Brückenverbund: 8mm
	Weit	0.03	0.09	0.1	0.5					
CADstar Titan	Strenger Sitz	0.02	0.04	0.05	1.5					
	Normal	0.02	0.06	0.07	0.8	0.4	0.1	0.1	65°	Verblockung: 6mm Brückenverbund: 8mm
	Weit	0.02	0.08	0.09	0.5					